
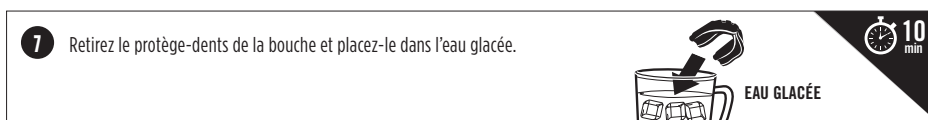
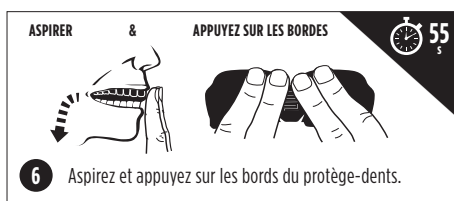
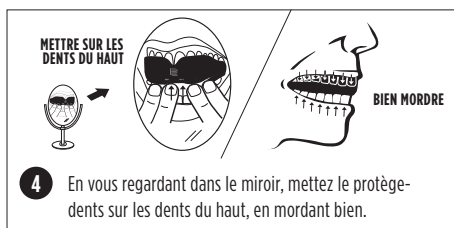
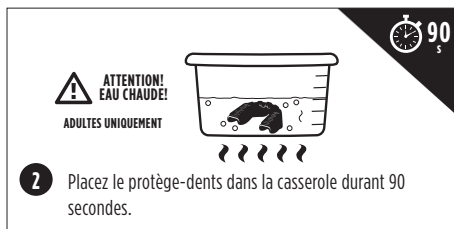


INSTRUCTIONS DE POSE


Vous aurez besoin de : une casserole remplie de 3 cm d'eau, d'une cuillère à égoutter, d'une tasse d'eau glacée, d'un miroir et d'une minuterie.

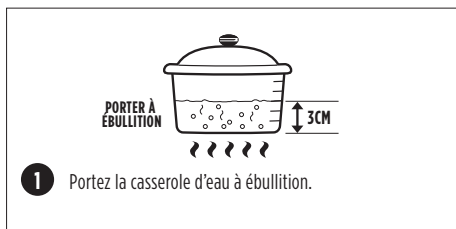

8 Mettez le protège-dents dans la bouche et vérifiez s'il bien en place et ajusté confortablement.

9 Si le protège-dents n'est pas ajusté confortablement ou ne reste pas en place (**A** un protège-dents bien ajusté doit supporter un poids suspendu de 100 g durant au moins 30 secondes sans tomber), reposez-vous pendant quelques minutes avant de répéter les procédures 1 à 7 (les procédures 5 et 6 sont les étapes les plus importantes).

10 Seulement si nécessaire, (**B**) utilisez une paire de ciseaux pour enlever soigneusement les petits bouts.

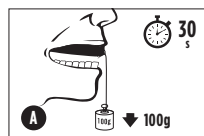

Ne jetez pas ce dépliant car il contient des informations qui sont importantes pour l'utilisateur.

AVERTISSEMENT!

Veillez vous assurer que vous avez lu et compris entièrement les mesures de sécurité suivantes et le guide utilisateur avant d'utiliser ce protège-dents :

Ce protège-dents ne doit pas être utilisé avec un appareil dentaire. NE mâchez PAS le protège-dents.

Pour vous assurer que le protège-dents fonctionne correctement, il est essentiel de l'ajuster correctement sur vos dents et gencives. Si vous mâchez le protège-dents et/ou ne l'utilisez selon l'usage prévu, son efficacité en termes de pose, protection et durabilité sera alors considérablement réduite. Veuillez suivre attentivement les instructions de pose suite au dos. L'utilisateur de ce protège-dents Ignis Pro doit veiller à inscrire son nom sur l'étiquette se trouvant à l'intérieur de la boîte du protège-dents et dans l'espace prévu ci-dessous dans le Guide de l'utilisateur du protège-dents.

Ce protège-dents ne doit pas être porté par une personne autre que celle dont le nom figure dans le Guide de l'utilisateur du protège-dents et sur la boîte du protège-dents.

Conformément au point 3 des instructions de pose figurant au dos, veuillez vous assurer que le protège-dents a suffisamment refroidi (45 secondes) avant de placer le protège-dents dans la bouche.

Pour les enfants dont la mâchoire est toujours en croissance (chute des dents primaires et éruption des dents secondaires), la personne responsable doit vérifier régulièrement la pose du protège-dents. Si vous constatez que le protège-dents est lâche ou trop serré sur les dents ou les gencives, il doit être remplacé.

GUIDE DE L'UTILISATEUR DU PROTÈGE-DENTS

- Cette boîte contient d'importantes informations et doit être conservée pour référence ultérieure.
- Ce protège-dents Ignis Pro (Protège-dents de type 2) a été certifié conforme à la norme SATRA M33:2011 – Édition 3, Performance Niveau 2 sur les tests d'impact pour les personnes pratiquant des activités de loisir et des sports de contact tels que le baseball, le basket-ball, le cricket, le football, le hockey, le lacrosse, les arts martiaux, le rugby et les autres sports de contact.
- Il existe trois niveaux de performance d'impact attribués aux protège-dents, à savoir 1, 2 et 3, où le niveau 1 offre le plus bas niveau de protection et le niveau 3 offre le niveau le plus élevé de protection.
- Lors du choix d'un protège-dents, veuillez sélectionner un protège-dents de taille et de type appropriés, en fonction de la fourchette d'âges indiquée par le fabricant. Veuillez vous assurer que le type et le niveau de performance du protège-dents que vous avez choisi sont adaptés au sport et à l'activité de loisir pour lesquels vous utiliserez le protège-dents. Une liste de toutes les activités sportives pour lesquelles ce protège-dents est adapté est fournie.
- Ce protège-dents ne doit pas être utilisé avec un appareil dentaire. Consultez le dentiste ou l'orthodontiste qui a posé l'appareil dentaire ou un autre appareil sur les dents, au sujet de la compatibilité de ce protège-dents. Il ne doit pas être porté à moins d'être approuvé par la personne qui a posé l'appareil dentaire.
- Pour connaître toutes les précisions de pose, veuillez consulter les instructions de pose au dos.
- Pour les enfants dont la mâchoire est toujours en croissance, la pose du protège-dents doit être contrôlée régulièrement. Le protège-dents devra être remplacé s'il n'est plus ajusté correctement.
- Consultez votre chirurgien dentiste ou votre orthodontiste avant de porter ce protège-dents si vous avez l'intention de l'utiliser en tant que gardien de nuit.
- Ce protège-dents est en TPR et en EVA, de qualité approuvée par la FDA.
- La boîte fournie constitue un récipient de stockage sûr et propre pour votre protège-dents. Le protège-dents doit être conservé dans la boîte lorsqu'il n'est pas porté. Utilisez de l'eau douce (à une température inférieure ou égale à 35°C/95°F) pour laver le protège-dents et l'étui après chaque utilisation. Séchez-le minutieusement avant de les ranger.
- Ce protège-dents Ignis Pro doit être porté exclusivement par _____ À partir de la date suivante / /
- Selon la régularité et l'intensité de l'usage, Makura Sport recommande de remplacer le protège-dents tous les 2 ans ; toutefois, vous devez effectuer un contrôle visuel du protège-dents après chaque usage. Si la surface de morsure est usée, fissurée ou fendue, il faut remplacer le protège-dents immédiatement.
- Si le protège-dents provoque une sensibilisation ou des réactions allergiques, ou si vous êtes mal à l'aise après avoir porté le protège-dents, vous devez consulter un médecin immédiatement.
- Ce protège-dents de type 2 a été testé et certifié conforme par SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way, Telford Way Industrial Estate Kettering, Northamptonshire NN 16 8SD, Royaume-Uni (Numéro de l'organisme notifié 0321).



Ce protège-dents ne contient pas de latex. Il n'est pas reconnu actuellement que les matériaux utilisés provoquent des réactions allergiques ou une sensibilisation.